




Installationsanleitung - Montage eines 2- oder 4 Punkt-Gurtes an einen Rollstuhl mit dynamischer Sitzplatte




Item Kit = 45278 besteht aus		
Anzahl	Artikelnummer	Beschreibung
2	82794	Gurt-Aufnahmeadapter für dynamische Sitzplatten
2	20296	Vierkantmutter M6
2	29089	Schraube M6 X 12
4	20063	Unterlegscheibe M6
4	20058	Selbstsichernde Mutter M6
4	20800	Schraube M6 X 16

An einem Rollstuhl der mit einer dynamischen Sitzplatte ausgestattet ist, sind 2 Gurt-Aufnahmeadapter 82794 montiert. Falls Sie diese nicht am Stuhl vorfinden, bestellen Sie bitte 2 X das Kit 45278.

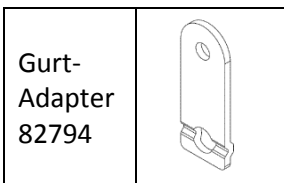

Um den Gurt-Aufnahmeadapter an der dynamischen Sitzplatte zu montieren, schieben Sie die Vierkantmutter 20296 in die an der Unterseite der Sitzplatte montierten Schiene und fixieren Sie den Gurt-Adapter von außen mit der Schraube 29089.

Zusammen mit dem 2- oder 4-Punkt-Gurt erhalten Sie die unten gezeigte Gurthalterung. Nutzen Sie die verbleibenden Teile, um die Gurthalterung an den Gurt-Aufnahmeadapter zu montieren.

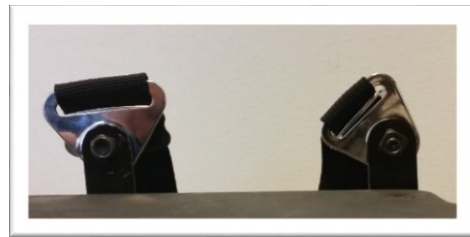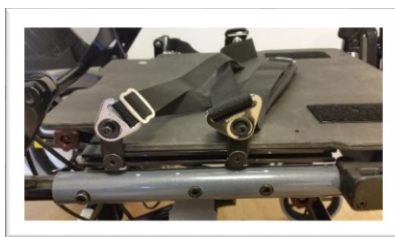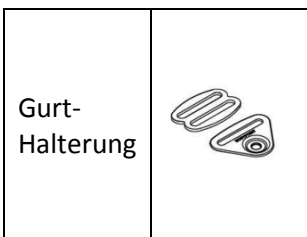

Folgen Sie bitte der Anleitung auf der nächsten Seite, um den Gurt zu justieren.

Zwei-Punkt Becken-Haltegurt



1. Legen Sie den gewünschten Befestigungspunkt fest.
2. Zentrieren Sie den Gurt am Becken und ziehen Sie das Gurtende durch die Gurt-Halterung.
3. Ziehen Sie den Gurt straff.



Vier-Punkt Becken-Haltegurt




1. Legen Sie den gewünschten Befestigungspunkt fest.
2. Befolgen Sie die oben genannten Anweisungen zur Befestigung der ersten Riemen
3. Befestigen Sie die zweiten Riemen am Stuhl, bis diese in den ersten Riemen verankert sind.
4. Ziehen Sie die zweiten Riemen fest, damit sich die ersten Riemen nicht verschieben.



Einstellung:

Wenn der Gurt ordnungsgemäß eingestellt und gestrafft ist, sollte er fest genug sitzen und das Becken des Benutzers sichern. Ziehen Sie den D-Ring von gepolsterten Gurten fest, bis kein Spielraum mehr besteht und sich die Polster unter der Schnalle berühren. Muss die Gurtlänge für einen sicheren Sitz angepasst oder der Gurt zur Reinigung abgenommen werden, kann dies mithilfe der Gurtendittings erfolgen.

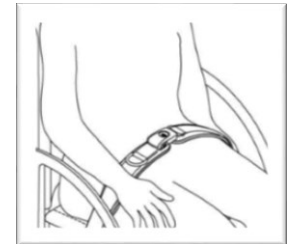

SICHERHEITSPRÜFUNG:

Wenn der Gurt ordnungsgemäß am Rollstuhl befestigt wurde, kann sich der Benutzer **nach vorne oder seitlich lehnen, um den korrekten Sitz zu prüfen.**

Prüfen Sie:

1. Normale Funktion der Schnalle und Befestigungsriemen.
2. Komfort - Achten Sie auf Bereiche, die reiben könnten.
3. Position - sollte der Gurt zu hoch oder niedrig befestigt sein, passen Sie die Befestigungspunkte an.
4. Störung mit anderen Geräten - Bringen Sie die Befestigungspunkte neu an, sofern erforderlich.

Diese Anleitung ist bei Lieferung immer Bestandteil jedes Gurtes und muss daher an den Benutzer oder Betreuer weitergeleitet und gespeichert werden.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Diese und weitere Montageanleitungen finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://de.my-netti.com/downloaden/bedienungsanleitungen>