

# Montageanleitung

## Einhandbremse auf oberem Rahmenrohr

Artikel 27282 – rechte Seite

Artikel 27283 – linke Seite



*Enable joy of life*

## Montageanleitung Einhandbremse auf oberem Rahmenrohr

Die Kits 27282 + 27283 enthalten jeweils:

- 1 Bremse zur Montage am Rahmenrohr
- 1 Klammer zur Befestigung der Bremse am Rahmenrohr
- 2 Bowdenzug-Endkappen
- 2 Bowdenzüge inklusive 2 Bowdenzugmantel-Endkappen
- 1 Bowdenzug-Führung

Lösen Sie zuerst die vorhandenen Bowdenzüge von den Trommelbremse-Ankerplatten am Rahmen hinten.


Befestigen Sie dann die Klammer und die Bremse am Rahmenrohr wie in der Abbildung unten gezeigt. Beachten Sie hier, dass Sie Klammer mit der Bremse so auf dem Rahmenrohr justieren, dass der Bremshebel in der aktiven, nach vorne zeigenden, Position nicht mit dem Ausziehstück für die Beinstütze kollidiert. Ziehen Sie die Klammer nicht zu fest an, da sonst der Gleitmechanismus innerhalb der Bremse blockiert werden kann.

Bitte beachten Sie, dass die Bremse/Klammer nach der Montage nicht mit dem Antriebsrad kollidiert.

Klammer

Bremse

Gewindeschraube mit Madenschraube

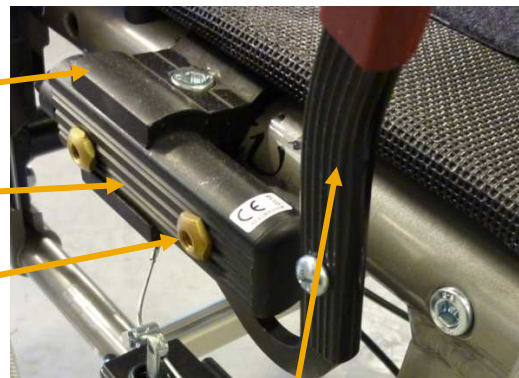



Die Bremse muss sich in einer aktiven Position befinden. Hierzu drücken Sie den Bremshebel nach vorne.

Die untenstehende Abbildung zeigt, wie Sie die Bowdenzüge durch die Bowdenzug-Führung und die Gewindeschraube in die Bremse einführen. Ziehen Sie dann die Züge ca. 1 mm zurück.

Nun ziehen Sie die Madenschraube, bei gleichzeitigem Halten der Gewindeschraube mit einem Maulschlüssel, fest an.


Gewindeschraube

Madenschraube

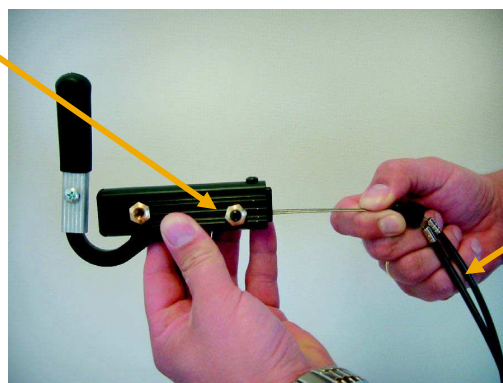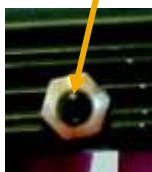

Bowdenzug-Führung

Bowdenzüge

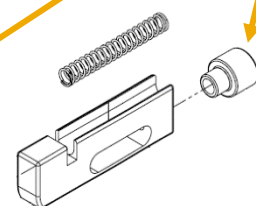

## Montage der Bowdenzüge an der Antriebsrad-Trommelbremse

Zum Kürzen der Bowdenzugmäntel ziehen Sie die Bowdenzüge aus den Bowdenzug-Mänteln heraus.  
Der Bowdenzug wird nach der Montage eingekürzt.

Kürzen Sie den Bowdenzugmantel den Sie auf der Seite der montierten Bremse nutzen auf 55 cm Länge und den Bowdenzugmantel für die andere Seite gemäß der nebenstehenden Tabelle. Beispiel: Für Sitzbreite 45 cm kürzen Sie den Bowdenzug auf 85 cm.

Sitzbreite	Bowdenzug-Länge
35cm	75cm
38cm	78cm
40cm	80cm
43cm	83cm
45cm	85cm
50cm	90cm
55cm	95cm

Nachdem Sie die Bowdenzugmäntel eingekürzt haben und schieben Sie die Bowdenzugmantel-Endkappen über die Bowdenzugmäntel. Nehmen Sie nun eine Zange und drücken Sie die Endkappen leicht an, sodass diese fest mit dem Bowdenzug verbunden sind.


**ACHTUNG:** Die Kappen nicht zu sehr quetschen, da sonst der Bowdenzugmantel im Inneren beschädigt werden könnte.

Schneiden Sie nun die hier im Bild rechts gezeigten 2 Bowdenzug-Endstücke mit einer Zange ab. und führen Sie die Bowdenzüge wieder in die Bowdenzugmäntel ein.



Die untenstehende Abbildung zeigt, wie der Bowdenzug an der Trommelbremse montiert wird.

**Achtung:** Montieren Sie zuerst den Bowdenzug auf der Seite auf der Sie die Bremse montieren und danach die andere Seite.

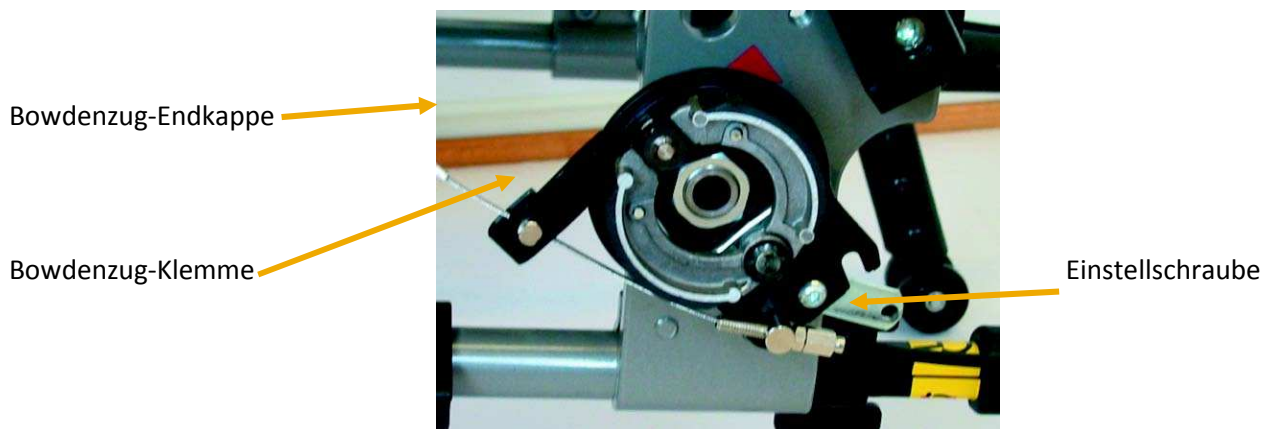

Schieben Sie den Bowdenzug durch die an der Trommelbremse befindliche Einstellschraube und Bowdenzug-Klemme.

Ziehen Sie nun am Bowdenzug und fixieren Sie den Zug mit der Bowdenzug-Klemme.

**Achtung:** Die Bremse darf nicht aktiviert sein, wenn Sie die Klemme fest ziehen.

Setzen Sie nun das Antriebsrad auf die Trommelbremse und stellen Sie den korrekten Bremszug mit der Einstellschraube ein.

Kürzen Sie nun den überstehenden Bowdenzug bis auf eine Länge von 4-5 cm hinter der Bowdenzug-Klemme ein und schieben

Sie eine Bowdenzug-Endkappe über den Bowdenzug. Pressen Sie diese mit einer Zange zusammen.

IM DIALOG SCHAFFEN WIR  
EINFACHE LÖSUNGEN UND  
STEIGERN DIE LEBENSFREUDE

**CE** Dieses Produkt stimmt mit der Richtlinie  
93/42/EEC für medizinische Hilfsmittel überein



Alu Rehab A/S  
Bedriftsvegen 23  
N-4353 Klepp Stasjon

T: +47 51 78 62 20  
post@My-Netti.com

Alu Rehab ApS  
Kløftehøj 8  
DK-8680 Ry

T: +45 87 88 73 00  
F: +45 87 88 73 19  
info@My-Netti.com

**My-Netti.com**