




Montage- und Bedienungsanleitung - Infusionsständer – Artikel 41987

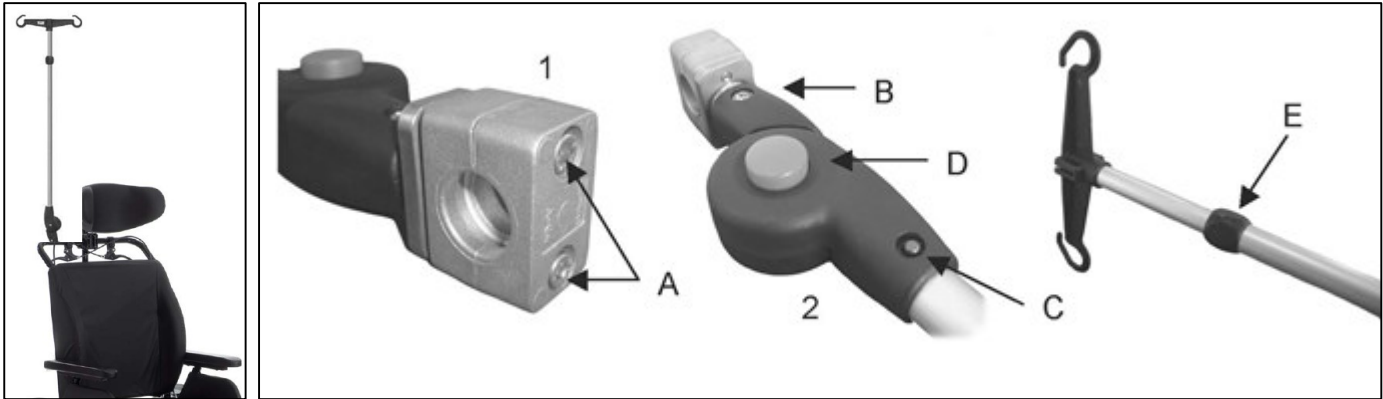

Auf absolute Kippsicherheit z. B. durch Anti-Kipp-Rollen oder Radstandverlängerung ist bei der Montage zu achten. Maximale Auszugshöhe 195 cm (Türhöhe). Geeignet für Infusionen und enterale Ernährungslösungen in Kunststoffflaschen oder Soft-packs bis max. 1000 ml. Alle Gebinde sind gegen Schlenkern zu sichern.

Er besteht aus:

1. dem Flaschenhalter, Kunststoff schwarz
2. der höhenverstellbaren und abnehmbaren Aluminium-Infusionsstange
3. dem verstellbaren Knickgelenk
4. der Halterung mit Befestigungskloben

Montieren Sie zunächst den Befestigungskloben (1) am Schiebegriff oder der Schiebbestange des Rollstuhles. Im Lieferzustand ist die Schelle montiert für Schiebegriffe in Fahrtrichtung (wie bei jedem Faltrollstuhl). Die Montage erfolgt mittels der Inbusschrauben (A) an der Unterseite.

Drehen Sie diese Inbusschrauben so fest, dass sich der Halter nicht mehr auf dem Rohr drehen kann.

Handelt es sich um einen Pflegerollstuhl mit querliegender Schiebbestange, so lösen Sie die Schraube mit Mutter (B), drehen das Knickgelenk aus Kunststoff (2) um 90 Grad und setzen danach die Schraube mit Mutter (B) wieder ein.

Soll der Infusionshalter an einem Griffstück montiert werden, dass ca. im 45-Grad-Winkel zur Fahrtrichtung steht, so lösen Sie ebenfalls die Schraube mit Mutter (B), drehen das Kunststoffgelenk (2) um nur 45 Grad und setzen danach Schraube und Mutter (B) wieder ein.

2017-01-MD131DE

Durch den Druckknopf (D) in der Lochreihe können Sie die Höhe des Infusionsständers verstellen. Mit der am Ende der Lochreihe befindlichen Klemmverschraubung (E) wird dann die Infusionsstange nochmals gesichert und klapperfrei gehalten.

Wird der Infusionshalter einmal nicht benötigt, so kann dieser durch Drücken des Druckknopfes (C) vom Halter entfernt werden.



Aus Sicherheitsgründen muss dann das schwarze Knickgelenk (3) um 180 Grad eingeklappt werden. Konstruktionsbedingt besteht hierbei Klemmgefahr für die Finger.

Diese Anleitung ist Bestandteil eines jeden Infusionshalters und muss daher aufbewahrt und dem Nutzer oder dessen Angehörigen/Betreuungspersonal ausgehändigt werden.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung,, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Kontakt:

Aus Deutschland: Dänemark: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Telefon: 0800-888 45 60

Außerhalb Deutschlands: Dänemark: Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry | info@My-Netti.com | Telefon: +45 87887300

Diese Montageanleitung finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://de.my-netti.com/downloaden/bedienungsanleitungen>

2017-01-MD131DE