
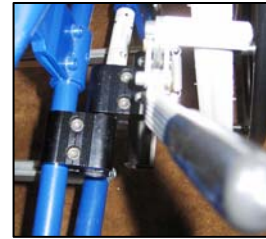



## Montageanleitung Kniehebel-Bremsadapter

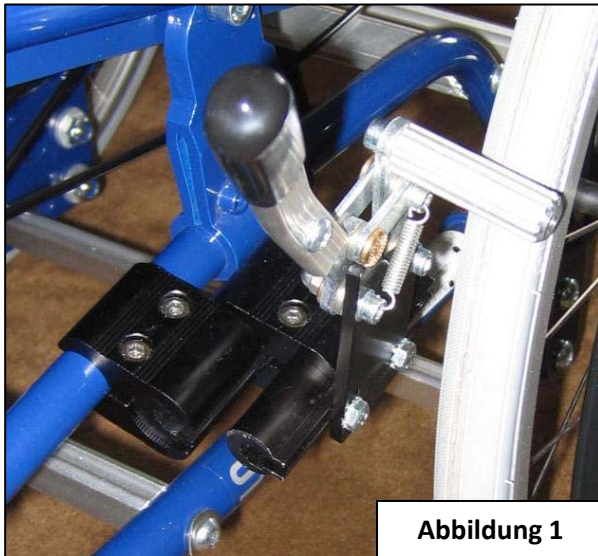

Wenn Sie die Sitzbreite des Rollstuhles erweitern, muss gegebenenfalls die Kniehebel-Bremse weiter nach außen montiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die am Rollstuhl montierte Bremshalterungs-Klemme.
2. Montieren Sie die Bremshalterungs-Klemme (Artikel 2300) am Rahmenrohr des Rollstuhles.
3. Schieben Sie den Bremsadapter (Artikel 27576) nun so in die Klemme, dass die zweite Klemme daneben platziert werden kann.
4. Ziehen Sie die Schrauben handfest an.
5. Nun schieben Sie die zweite Klemme auf den Adapter, richten Sie die Bremse aus und ziehen alle Schrauben fest an.
6. Achten Sie darauf, dass der Bremsbolzen mittig auf dem Reifen platziert ist (siehe Abbildung 1).

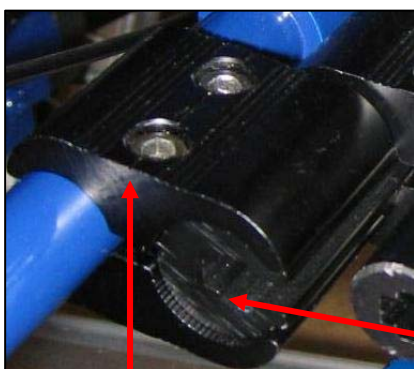

Bremshalterungs-Klemme (Artikel 23000)



Bremsadapter (Artikel 27576)