


## Montageanleitung Seitenpelotte Netti 4U



Artikel	Artikelnummer
Seitenpelotte Netti 4U Links	28512
Seitenpelotte Netti 4U Rechts	28511

Werkzeuge: 5 mm & 6 mm Inbusschlüssel

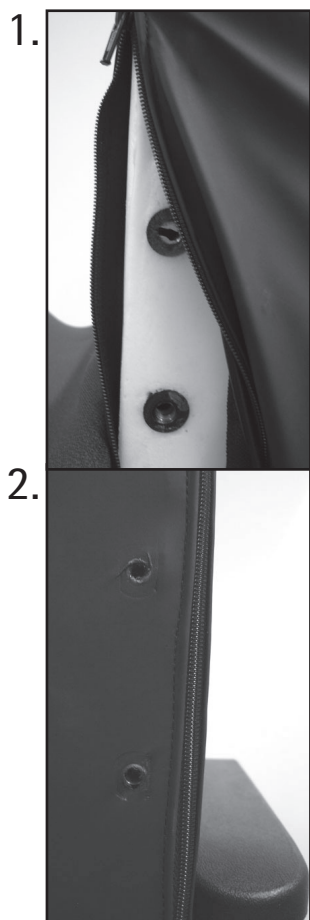


1. Am Rückenlehnenrahmen befinden sich unter der Abdeckung auf jeder Seite zwei Gewindelöcher. Diese sind für die Montage der Seitenstützenhalterungen vorgesehen.

2. Machen Sie mit Hilfe eines Vorstechers zwei Löcher in den Außenbezug.


3. Montieren Sie die Halterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben.

4. Montieren Sie die Seitenstützenbefestigung an der Halterung.

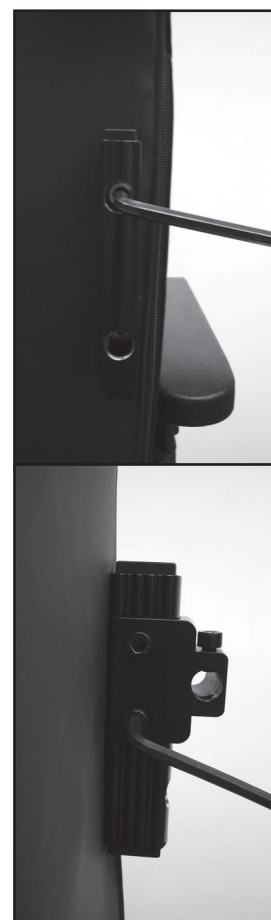


## Einstellung der Pelotte :

Am Adapter ist ein Kipp-Klemmhebel eingeschraubt. Nutzen Sie diesen zur Breiteneinstellung der Pelotte. Zum Abnehmen der Pelotte lösen Sie den Kipp-Klemmhebel und ziehen Sie die Pelotte nach außen. Verdrehen Sie den Kipp-Klemmhebel nach Innen, damit dieser nicht mit dem Schiebegriff kollidiert.

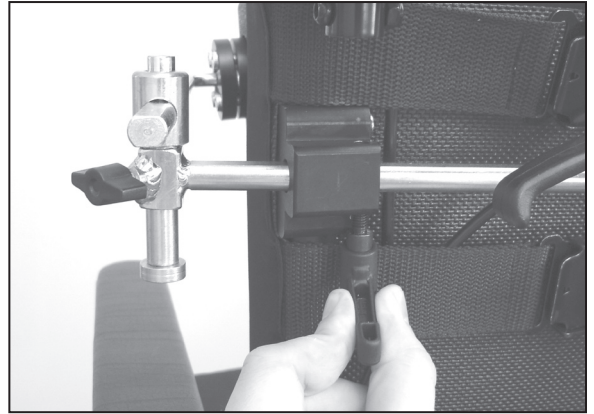

Um die Pelottentiefe einzustellen, lösen Sie die nach oben zeigende Inbusschraube am Drehadapter und stellen Sie die Tiefe ein. Danach ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

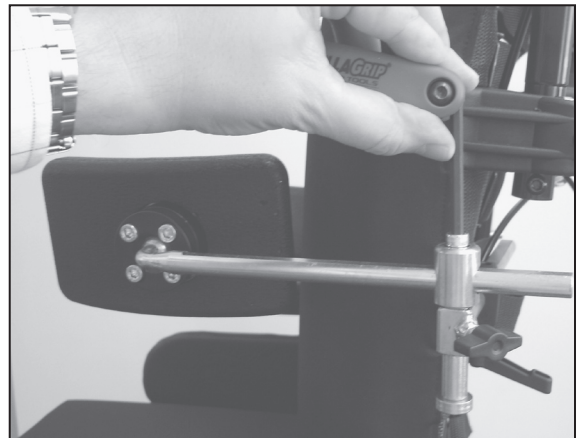

Um den Winkel des Pelottenpolsters einzustellen, lösen Sie die 4 Schrauben an der Außenseite der Pelotte und stellen Sie den benötigten Winkel ein. Danach alle 4 Schrauben wieder fest anziehen.



Die Seitenpelotte kann nach außen abgeschwenkt werden. Hierfür lösen Sie die schwarze Feststellschraube und ziehen den nach vorne zeigenden Pelottenarm nach oben, dann die Pelotte nach außen schwenken. Nach dem Einschwenken der Pelotte die Feststellschraube wieder fest anziehen.

