


MONTAGEANLEITUNG

Seitenpelotte Correction für Netti III, Netti 4U CED , Netti 4U CE PLUS und Netti Mobile

Artikelnummern : **27374** Seitenpelotte links
 27375 Seitenpelotte rechts

Werkzeuge:
5 mm Inbusschlüssel

1. Um den Adapter zu montieren, ziehen Sie die Schiebegriffe nach oben aus den Halterungen oder schwenken Sie bei einem Netti 4U CED den Schiebebügel nach oben.
Lösen Sie die Gurte der Rückenbespannung und platzieren Sie den hier im Bild gezeigten Adapter in der von Ihnen gewünschten Höhe an den Rohren der Rückenlehne.

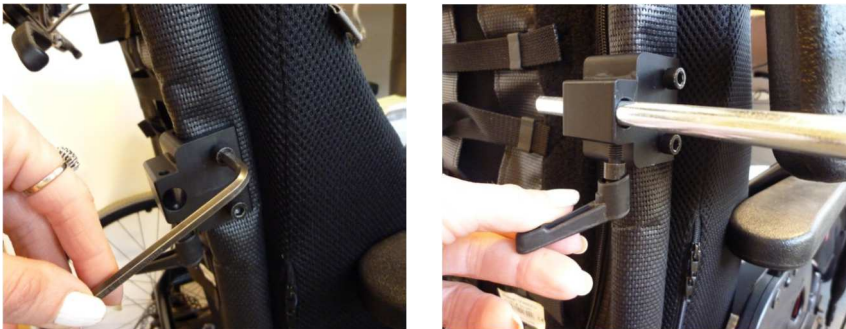



Es könnte notwendig sein, den anpassbaren Klettücken an dieser Stelle auszuschneiden.
Wahlweise können Sie auch einen Klettücken mit Aussparungen (Artikel 44992 oder 44993) bestellen und diesen montieren. Fixieren Sie den Adapter und ziehen Sie die Schrauben fest an.

Achtung! Wenn Sie die Seitenpelotten für den Netti Modelle verwenden, empfehlen wir das Flip-Rückenkissen zu verwenden.

2. Am Adapter ist ein Kipp-Klemmhebel eingeschraubt. Nutzen Sie diesen zur Breiteneinstellung der Pelotte. Nach Einstellung der gewünschten Breite, drehen Sie den Kipp-/ Klemmhebel nach innen, damit dieser nicht mit dem Schiebegriff kollidiert.

Die Position der Pelotte zum Körper stellen Sie über die an der Rückseite der Pelotte befindlichen 4 Schrauben ein.

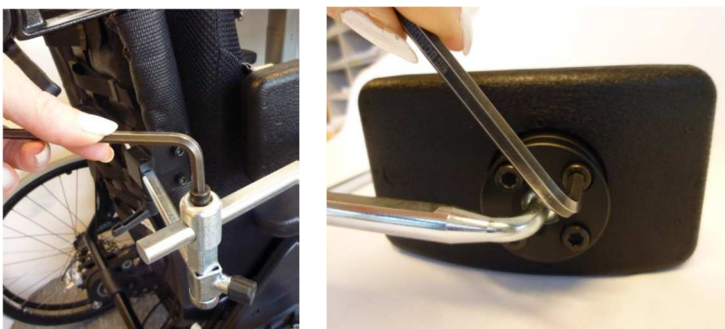

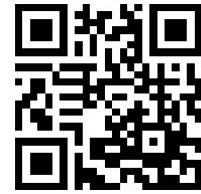

3. Um die Pelotten in der Tiefe einzustellen, lösen Sie die nach oben zeigende Inbusschraube am Drehgelenk und stellen Sie die Tiefe ein. Danach ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

Die Seitenpelotte kann, z.B. für einen Transfer, nach außen abgeschwenkt werden. Hierfür lösen Sie die im Bild unten gezeigte schwarze Feststellschraube und ziehen den nach vorne zeigenden Pelottenarm nach oben, dann die Pelotte nach außen schwenken.

Nach dem Einschwenken der Pelotte ziehen Sie die schwarze Feststellschraube wieder fest an.



Diese Anleitung ist bei Lieferung immer Bestandteil jeder Seitenpelotte und muss daher an den Benutzer oder Betreuer weitergeleitet und gespeichert werden.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Diese Montageanleitung finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://de.my-netti.com/downloaden/bedienungsanleitungen>