

MONTAGEANLEITUNG

Seitenpelotte Basic für Netti 4U Base

Artikelnummer: 88468 – beidseitig zu verwenden

Werkzeuge:

Inbusschlüssel 4 + 3

Die Seitenpelotte für Netti 4U Base besteht aus 2 Komponenten:

1. eine Klammer zur Montage am Rückenrohr
2. die Seitenpelotte (Type Basic)

Die Pelotte ist in der Höhe, in der Breite und in der Tiefe einstellbar.





Separieren Sie zuerst die beiden Klammerteile, indem Sie mit dem 4er-Inbusschlüssel die 2 hier gezeigten Schrauben lösen und im Anschluß wieder locker zusammenfügen. Das Rückenrohr befindet sich nun zwischen den beiden Klammerteilen.


Positionieren Sie danach die Klammer im rechts gezeigten Bereich auf dem Rückenrohr in der von Ihnen gewünschten Höhe und ziehen Sie die Schrauben so an, dass die Klammer später noch positioniert werden kann.

Schrauben Sie nun den Kipp-Klemmhebel aus dem in der Klammer befindlichen Gewinde nach oben, indem Sie den Hebel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag an das Rückenrohr drehen, dann den Hebel nach oben ziehen und im Uhrzeigersinn wieder zurückführen. Wiederholen Sie dies bis das Loch in der Klammer frei ist. Eventuell müssen Sie die auf der Unterseite der Klammer befindliche Madenschrauben mit dem 3er-Inbusschlüssel ebenfalls etwas aus dem Gewinde drehen.

Schieben Sie nun die Pelotte in die Klammer und drehen Sie den Kipp-Klemmhebel wieder in das Gewinde.


Sobald der Nutzer des Rollstuhles im Rollstuhl sitzt, positionieren Sie die Pelotte in der von Ihnen gewünschten Höhe und Breite. Sie können den Winkel der Pelotte auf dem Rundrohr nun ebenfalls bestimmen, indem Sie die Pelotte nach innen oder außen führen. Sobald Sie die Justierung abgeschlossen haben, ziehen Sie die 2 Schrauben fest an.

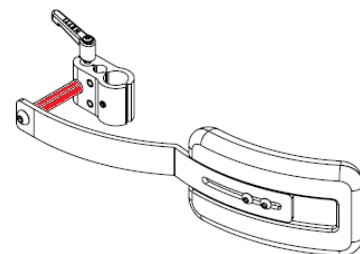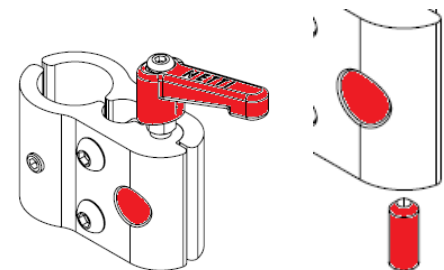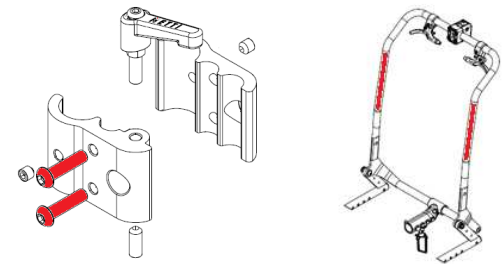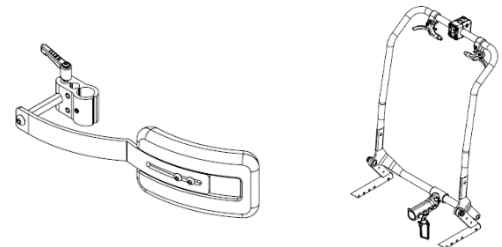

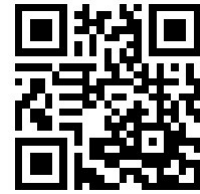


Die Position der Klammer kann mit den vorne an der Klammer befindlichen 2 Madenschrauben zusätzlich gesichert werden.

Um ein unautorisiertes Entfernen der Pelotte zu verhindern, können Sie Madenschraube gegenüber des Kipp-Klemmhebels fest anziehen.

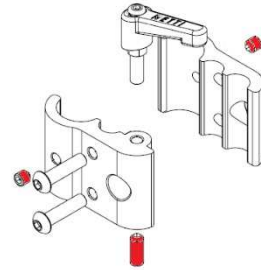


Um die Pelotte in der Tiefe an den Körper des Benutzers anzupassen, lösen Sie 2 Schrauben auf der Rückseite des Pelottenpolsters und verschieben Sie die Pelotte bis zur gewünschten Tiefe. Ziehen Sie die 2 Schrauben wieder fest an.

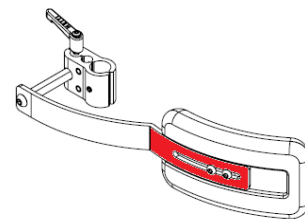

Die Seitenpelotte für Netti BASE ist sowohl für die linke, als auch die rechte Seite nutzbar.

Um die Pelotte für links oder rechts zu nutzen, drehen Sie die Klammer um 180° Grad und schrauben Sie den Kipp-Klemmhebel oben ein und die Madenschraube unten.

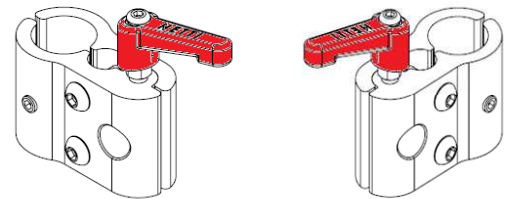

Diese Anleitung ist bei Lieferung immer Bestandteil jeder Seitenpelotte und muss daher an den Benutzer oder Betreuer weitergeleitet und gespeichert werden.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Produkt oder zu dieser Montageanleitung, dann wenden Sie sich gerne an unseren Kundenservice.

Diese Montageanleitung finden Sie auch auf unserer Homepage unter:

<http://www.my-netti.de/downloaden/bedienungsanleitungen>