





## Montageanleitung Seitenpelotte Stabil

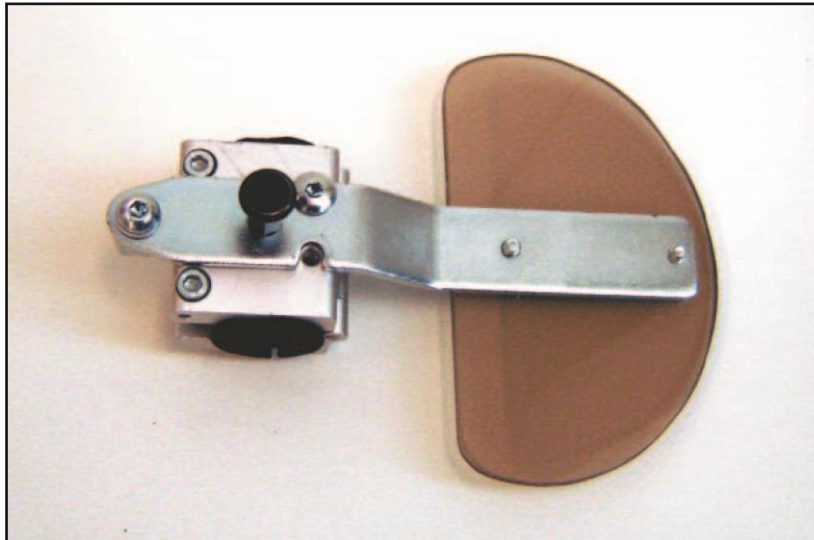

Artikel	Artikelnummer
Seitenpelotte Stabil Links	26830
Seitenpelotte Stabil Rechts	26843

Werkzeuge: 6 mm Inbusschraube, Cuttermesser

Entfernen Sie die 2 6mm Inbusschrauben aus dem Klemmadapter und klappen Sie den Adapter auf.

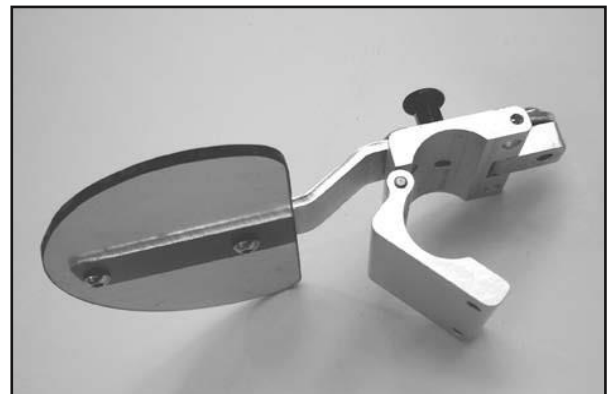

Wird die Seitenpelotte Stabil auf einem viereckigen Rückenrohr montiert (Netti-Modelle ab 8-2004) verwenden Sie bitte das beigefügte Plastikadapterstück






Nachdem Sie das Rückenkissen an den Benutzer Angepasst haben ( optimale Höhe – Lendenbereich beachten) platzieren Sie die Seitenpelotte Stabil auf das Rückenrohr.

Die Unterstützung sollte parallel mit der integrierten Seitenunterstützung des Rückenlehnenkissens sein. Schneiden Sie mit den Klemmadapter am Rückenrohr fixieren zu können.

Bei einem viereckigen Rückenrohr legen Sie zuerst das Plastikadapterstück um das Rückenrohr

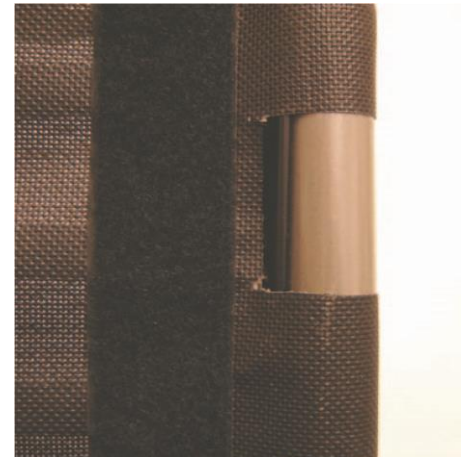

Den Klemmadapter um das Plastikadapterstück herumlegen, zuklappen und mit den 6mm Schrauben lose fixieren. Bevor Sie die Schrauben festziehen, können Sie den Winkel des Klemmadapters bestimmen, um mehr oder weniger Stabilität auf das Rückenkissen zu setzen.



Um die Seitenpelotte nach außen zu schwenken, ziehen Sie den Auslöseknopf nach außen und heben Sie die Pelotte nach oben an.

