

Montageanleitung Sitzhose

Artikelnummer D60001 = Größe L : für SB 35 + 40 cm

Artikelnummer D60002 = Größe XL: für SB 43 – 50 cm



Werkzeug: 2 Stück Maulschlüssel 13mm


1. Positionieren Sie die Sitzhose mittig auf der Sitzfläche, achten Sie auf genügend Abstand zum Rücken (Rückenpolster). Die optimale Position ist gefunden, wenn die vordere Rundung der Sitzhose nicht über den Schrittbereich des Nutzers hervorsteht.



2. Montieren Sie den Gurthalter innen am Rückenteilhalter (Kröpfung nach außen zeigend)
Hierzu benötigen Sie die 13er Maulschlüssel.
Die Unterlegscheibe innen vor den Gurthalter setzen.
Die Mutter außen fest anziehen.



3. Schieben Sie das 1. Gurtschloss auf den Gurt bis ca. 10 cm zur Sitzhose heran und führen Sie den Gurt von innen nach außen durch den Gurthalter und dann wieder durch das Gurtschloss nach vorne zur Sitzfläche.
Fixierung der Sitzhose am Rahmen.

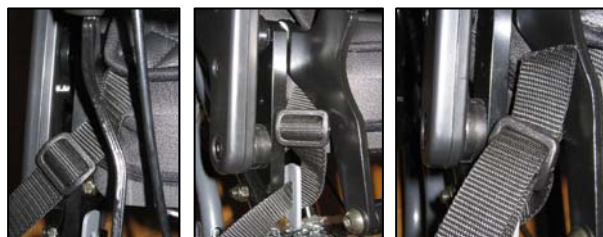

4. Schieben Sie nun das 2. Gurtschloss über den Gurt und ziehen Sie den Gurt durch die Gurtschließe.
Hier bestimmen Sie die Position der Gurtschließe.
Die für den Nutzer richtige Position stellen Sie hier ein und ziehen das Gurtband wieder durch das Gurtschloss.
Somit ist die Position fixiert und muss nicht laufend verstellt werden.



5. Achten Sie bei der Anlage der Sitzhose darauf, dass die Sitzhose nicht zu stramm angelegt wird und es keinen Faltenwurf gibt. Der Gurtverlauf der nach hinten führenden Bänder sollte im 45°-Winkel erfolgen.



6. Rechtlicher Hinweis:
Die Sitzhose ist mit Gurtschließen ausgestattet, die vom Nutzer selbst geöffnet werden können.
Diese Gurtschließen dürfen nur dann gegen nicht vom Nutzer selbst zu öffnende Schließen getauscht werden, wenn ein richterlicher Beschluss dies ausdrücklich erlaubt > Fixierung!