



Montageanleitung – Velcro mit Aussparung für Seitenpelotten

1. Entfernen Sie das am Rollstuhl befindliche Velcro in dem Sie die Schraube, die das Velcro oben am Rückenrohr hält, entfernen.

2. Montieren Sie nun das Velcro mit Aussparung für die Seitenpelotten mit dem Reißverschluss am Rückenrohr. Achten Sie darauf, dass Sie die Bowdenzüge nach innen führen.



3. Hängen Sie den unten am Velcro befindlichen Haken in das Rückenrohr ein.



4. Schließen Sie den Reißverschluss indem Sie ihn nach unten ziehen.



5. Befestigen Sie nun das Velcro oben mit der Schraube.



6. Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite und montieren Sie die Seitenpelotten in der gewünschten Höhe.

2016-06- MD0108DE