



Alu Rehab ApS

Montage- und Bedienungsanleitung

Universal-Gerätehalter

Version 01-2016

für Elektrorollstuhl Netti Mobile

inklusive Beschreibung der Montage der
Abdeckplatte (2.Ebene) für den Universal-Gerätehalter

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | DK-8680 Ry


Tel. DE: 0800 8884560 | Fax DE: 0800-8884568

Tel. A/CH: +45 87 88 73 00 | Fax A/CH: +45 87 88 73 19

info@My-Netti.com | www.My-Netti.com

Montage- und Bedienungsanleitung Universal-Gerätehalter Netti Mobile

Im Dezember 2015 haben wir eine in den Abmaßen und im Design geänderte Version unseres Universalgerätehalters in den Verkehr gebracht.

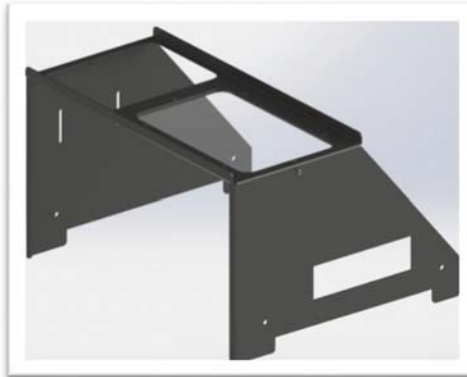

Der Universalgerätehalter kann nun auch für die neueste Generation von Sauerstoffcontainern (sog. LOX-Container) verwendet werden. Siehe Bild 1.

Die Designänderung berücksichtigt jedoch weiterhin die Nutzung der noch weit verbreiteten Flaschensysteme. Siehe Bild 2.

LOX-Container




Bild 1

Flaschensystem



Bild 2

Die Auslassung im Boden des Universalgerätehalters ist nun rechteckig und mit einer Abdeckung versehen, die um 180° gedreht werden kann, um eine runde Sauerstoffflasche aufzunehmen.

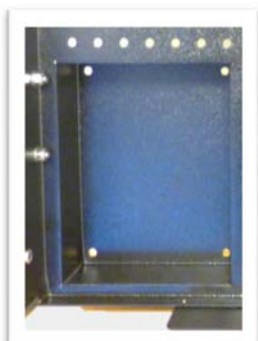



Inhaltsverzeichnis:

1. Beschreibung des Universal-Gerätehalters
2. Demontage der am Rollstuhl montierten Anti-Kippstützen
3. Montage des Gerätehalters am Rollstuhl
4. Beschreibung der Haltewinkel und deren Verstellung
5. Montage der optional erhältlichen Abdeckplatte (2.Ebene)
6. Erläuterungen zur Aufnahme eines Sauerstoffbehältnisses
7. Darstellung des kompletten Universal-Gerätehalters
8. Technische Maße und Angaben zum Artikel
9. Grundausstattung des Netti III HD/XHD des Universal-Gerätehalters
10. Hinweis zum Maximalgewicht
11. Hinweis zu dieser Montage- und Bedienungsanleitung
12. Hinweise zur Anwendung des Rollstuhls in Kombination mit dem Gerätehalter

Bitte beachten Sie, dass die Antikippstützen immer nach unten geschwenkt zu benutzen sind!



Die folgenden Bilder in dieser Anleitung zeigen zum Teil die alte Version des Gerätehalters. Die Funktion und die Montage sind jedoch unverändert gültig für die neue Version.

Die Bemaßung wurde durch die Veränderung im Design modifiziert. Angaben zu den aktuellen Maßen finden Sie auf Seite 10 dieser Anleitung.

Montage- und Bedienungsanleitung Universal-Gerätehalter Netti Mobile

Sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten den Artikel Universal-Gerätehalter zur Montage am Netti Mobile vormontiert und fertig zur Montage an einen Netti Mobile.

Dieser Universalgerätehalter dient dem Transport von medizinischen Geräten, die bei der Mobilisierung von Patienten im Rollstuhl am Rollstuhl mitgeführt werden sollen.


Wir bitten Sie, diese Montageanleitung vor der Montage sorgfältig zu lesen, und die Hinweise im Text genau zu beachten.

Bitte händigen Sie diese Anleitung dem Endnutzer persönlich aus und weisen Sie auf die Gefahren hin, die eine Nutzung ohne herabgeschwenkte Antikippstützen nach sich ziehen kann.

1. Beschreibung des Universal-Gerätehalters mit Abdeckplatte (optional):

Abbildung 1 zeigt einen Universalgerätehalter mit Abdeckplatte für einen Netti III. Spezifikationen für die Montage an einen Netti Mobile erfolgen ab Seite 4.

- A** = Universal-Gerätehalter (Plattform)
- B** = beidseits Einschubrohre zur Montage am Rollstuhl
- C** = beidseits Aufnahmhülsen für Antikippstützen
- D** = beidseits Antikippstützen
- E** = 4 verstellbare Haltewinkel
- F** = Abdeckplatte (2. Ebene)
- G** = schräge Auflageplatte für Beatmungsgerät
- H** = Loch zur Aufnahme Sauerstoffbehältnis oben
- I** = Loch zur Aufnahme Sauerstoffbehältnis unten
- J** = Kontroll-Sichtfenster

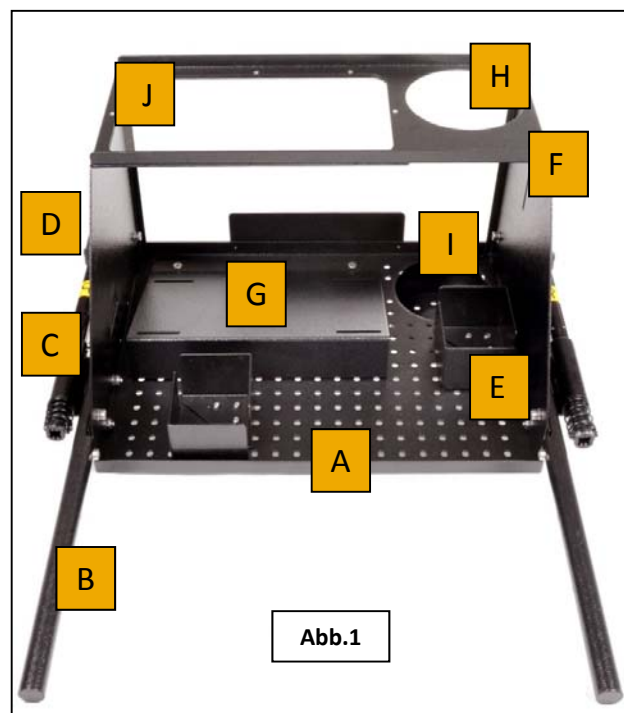


2. Demontage der am Rollstuhl montierten Anti-Kippstützen

Die Anti-Kippstützen sind links und rechts neben dem Batteriefach montiert (Abb.2) und mit einer Feder und einem Sicherungsstift in den Anti-Kippstützen-Aufnahmen gesichert (Abb.3).



(Abbildung 2)

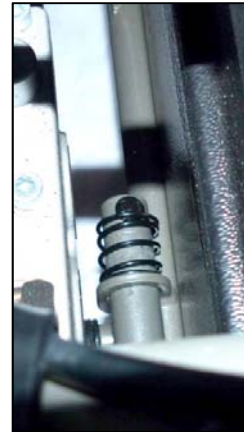

(Abbildung 3)

Zur Demontage ziehen Sie die Anti-Kippstützen nach hinten und drehen Sie die Anti-Kippstützen 180° nach oben, schieben Sie dann die Feder nach hinten und drücken Sie den Sicherungsstift nach unten aus dem Loch. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

Da der Bereich zwischen Batteriekasten und Rahmen begrenzt ist, empfiehlt es sich, den Batteriekasten zu entfernen. Somit erhalten Sie leichteren Zugang zum Arbeitsbereich.

Falls Sie den Batteriekasten zur Demontage der Anti-Kippstützen entfernt haben sollten, müssen Sie für die nächsten Schritte den Batteriekasten wieder einsetzen und sichern.

3. Montage des Gerätehalters am Rollstuhl

Die Trägerplatte bzw. die Einschubrohre (Abb.4) werden mit einer Feder und einer Sicherungsschraube am Rollstuhl fixiert. Lösen Sie zuerst die Sicherungsschrauben A und entfernen Sie danach die Federn B vom Einschubrohr (Abb.5).



(Abbildung 4)



(Abbildung 5)


Schieben Sie dann den Gerätehalter-Träger bis zum Anschlag in die Anti-Kippstützen-Aufnahmen hinten links und rechts neben dem Batteriefach (Abb.6).



(Abbildung 6)

Montage- und Bedienungsanleitung Universal-Gerätehalter Netti Mobile


Die Einschubrohre müssen nun mit der Feder und der Sicherungsschraube am Rollstuhl gesichert werden (Abb.7). Hierzu schieben Sie die Feder A über das Einschubrohr und drehen die Sicherungsschraube B mit einem passenden Inbusschlüssel in das Einschubrohr ein und ziehen die Schraube fest an. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. (Abbildung 7)

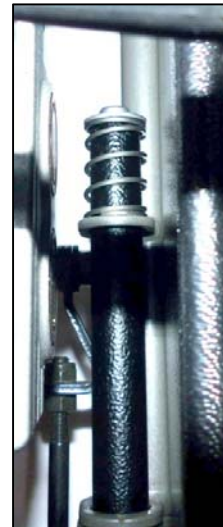

Im nächsten Schritt müssen die Anti-Kippstützen am Gerätehalter montiert werden. Schieben Sie hierzu die Anti-Kippstützen in die Aufnahmen am Gerätehalter und fixieren Sie diese mittels Feder und Sicherungsstift (Abb.8 + Abb. 9)




(Abbildung 8)

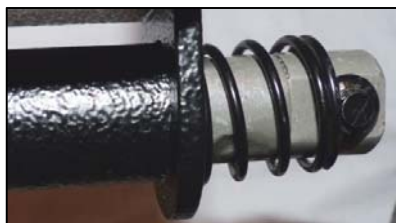

(Abbildung 9)


Wir weisen darauf hin, dass die Anti-Kippstützen stets nach unten gedreht sein müssen.

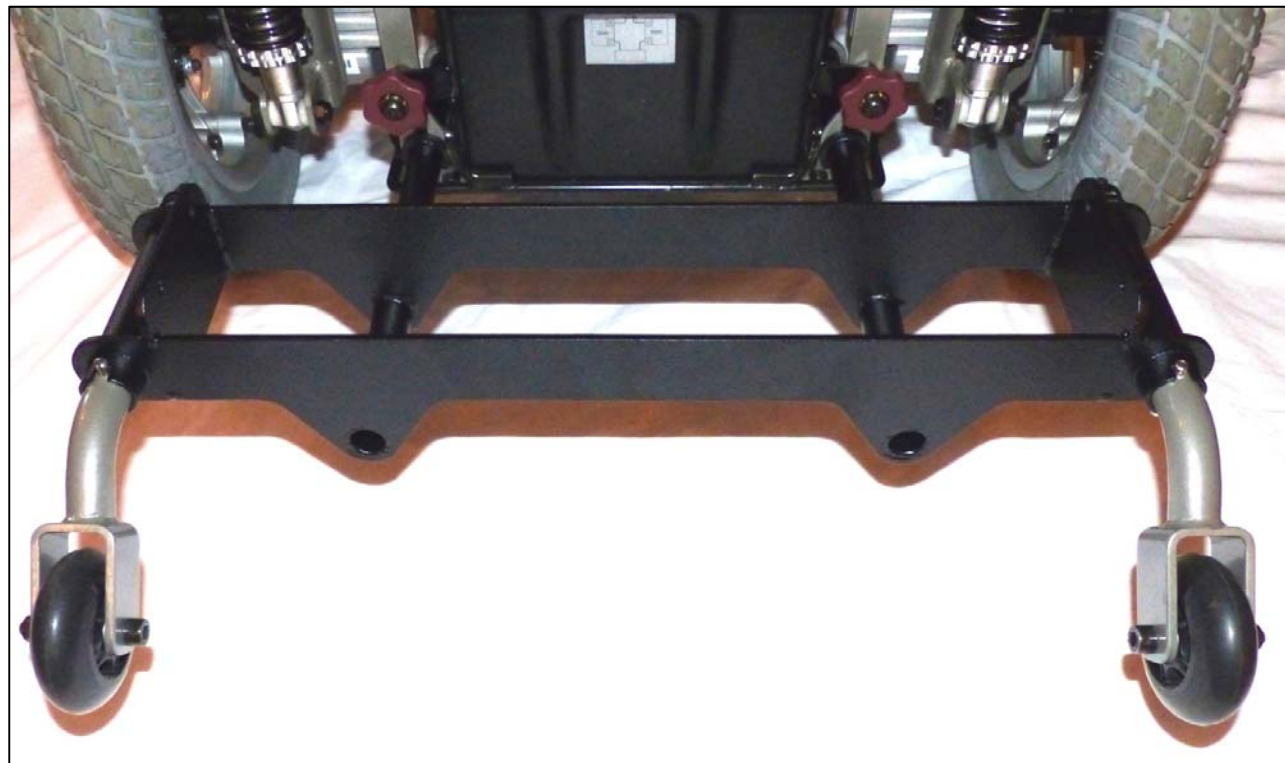


Montage- und Bedienungsanleitung Universal-Gerätehalter Netti Mobile

Montieren Sie im nächsten Schritt die Gerätehalterplatte auf dem Träger.

Positionieren Sie die Platte auf dem Träger so, dass die beiden mittleren Löcher übereinanderstehen (Abb.10 + Abb.11)) und befestigen Sie diese mit den beigelegten Schrauben.

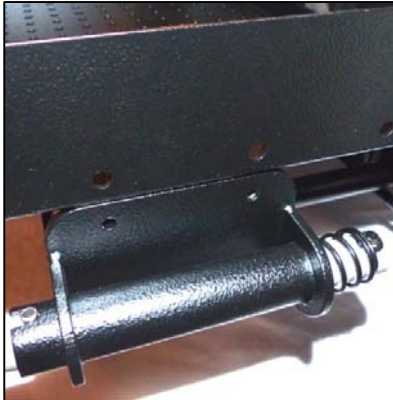

(Abbildung 10)

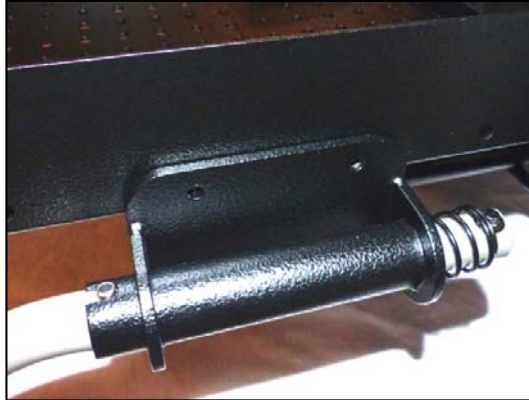

(Abbildung 11)

Der Gerätehalter ist nun ordnungsgemäß am Rollstuhl montiert und kann optional mit einer Abdeckplatte versehen werden.

An der nach hinten zeigenden Kante des Gerätehalters sind aus Sicherheitsgründen (Fahrbetrieb bei reduzierten Lichtverhältnissen) 2 Reflexionsstreifen aufgeklebt (Abb.12).



4. Verstellung der Haltewinkel

Die Lochblech-Plattform (Abb.13) ist so konstruiert, dass die Haltewinkel (Abb.14) über die Lochabstände frei auf der Plattform positioniert werden können.

Lösen Sie die 3 Schrauben der Haltewinkel an der Unterseite der Plattform (Abb.14) und passen Sie die Winkel an die Größe des Gerätes an. Schrauben Sie nach der Positionierung die Schrauben wieder von unten durch das Lochblech in die Haltewinkel und ziehen Sie sie fest.

Eventuelle Zwischenräume zwischen Gerät und Haltewinkel gleichen Sie durch Schaumstoff aus.

Zur Vibrationsminderung können Sie die beiliegenden Gerätefüsse (Abb.16) unter das Gerät kleben.

Ein zusätzliches Set Haltewinkel ist optional gegen Aufpreis erhältlich = D42900 (4er-Set)

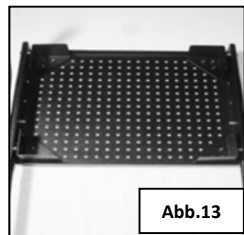


Abb.13

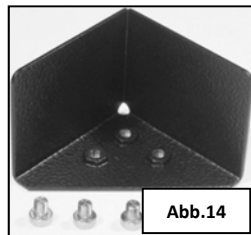


Abb.14

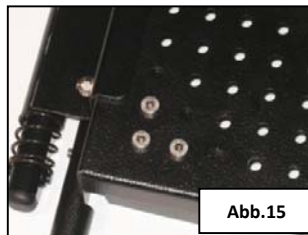


Abb.15

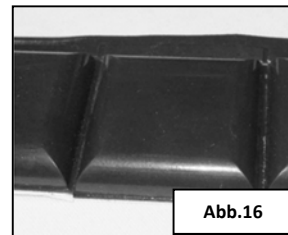


Abb.16

5. Montage der Abdeckplatte (2.Ebene) **F**

Die Abdeckplatte ist optional gegen Aufpreis erhältlich.

Die Abdeckplatte (Abb.17) dient dem Schutz des darunterliegenden Gerätes oder als 2.Ebene zur Aufnahme eines weiteren kleinen Gerätes.

Das Kontrollsicht-Fenster und die obere Aufnahme für ein Sauerstoffbehältnis sind durch einen zusätzlichen Deckel verdeckt. Diesen können Sie entfernen, indem Sie die 2 seitlichen Schrauben lösen (Abb. 18).

Bitte beachten Sie, dass Sie die 2.Ebene nicht überbelasten.

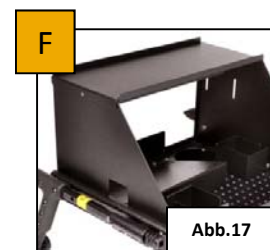


Abb.17



Abb.18






Maximal 4 Kilogramm Belastung auf die Abdeckplatte!

6. Einsetzen einer Sauerstoffflasche/Container in den Universalgerätehalter und Abdeckplatte (2.Ebene)


Die Abdeckplatte und der Universalhalter sind für die Aufnahme einer Sauerstoffflasche oder eines LOX-Containers vorbereitet. Hierzu müssen Sie den oben beschriebenen Deckel von der Abdeckplatte entfernen (Abb. 18). Das nun ersichtliche obere Loch (Abb. 19) hat einen genügend großen Durchmesser und ist geeignet eine standardisierte 2-Liter Sauerstoffflasche oder einen LOX-Container aufzunehmen. Zum Schutz der Flasche haben wir eine Kederleiste beigelegt, die Sie bitte gemäß Abbildung 19 einsetzen (neue Version ist rechteckig). Im Boden des Universalgerätehalters befindet sich eine Vertiefung (Abb.20) die mit einem Deckel verschlossen ist. Der Deckel kann gedreht werden und entweder für eine Sauerstoffflasche oder einen LOX-Container verwendet werden. (Abb. 21)

Stellen Sie das Sauerstoffbehältnis in den Universalgerätehalter und sichern Sie es mit den beigelegten Klettstreifen, in dem Sie die Klettstreifen durch die in der Seitenwand der Abdeckplatte befindlichen Schlitze führen. (Abb. 22 + 23)

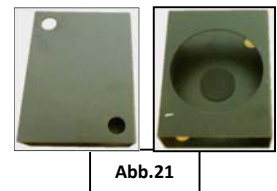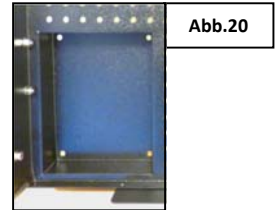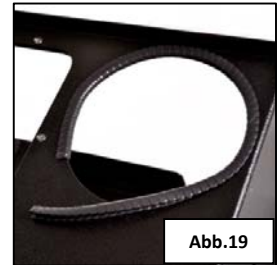

7. Darstellung des kompletten Universal-Gerätehalters + Abdeckplatte (Abb.24 + 25)

Abbildungen zeigen einen am Netti III zu montierenden Gerätehalter.

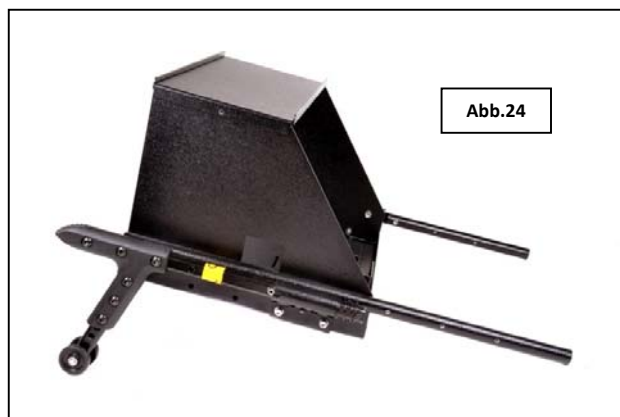

Optional können Sie zusätzlich ein 4er-Set Haltwinkel gegen Aufpreis erwerben.

Montage- und Bedienungsanleitung Universal-Gerätehalter Netti Mobile

8. Technische Maße

Universal-Gerätehalter:

Tiefe : 348 mm
Breite: Sitzbreite minus 36 mm
Kantenhöhe Haltewinkel: 60 mm
Belastbarkeit: max. 10 Kilogramm
Material: Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet

Abdeckplatte:

Tiefe: 193 mm
Breite: Sitzbreite minus 37 mm
Höhe: 237 mm (freier Raum)
Durchmesser Loch in der Adapterplatte = 115 mm

Sie erhalten den Universal-Gerätehalter und die Abdeckplatte für den Netti Mobile in Sitzbreite 40-45-50 sowie in Sonderanfertigung nach Ihren Spezifikationen.

9. Hinweis zum Maximalgewicht


Bitte beachten Sie, dass das Gewicht der gesamten Zuladung (Nutzer, Zubehöre, Universalgerätehalter und die darauf montierten Geräte, etc.) nicht über 140kg hinausgehen darf.

10. Hinweis zu dieser Montage- und Bedienungsanleitung

Diese Montage- und Bedienungsanleitung ist dem Nutzer des Rollstuhles oder seinen Angehörigen bei Lieferung auszuhändigen!



Bitte beachten Sie, dass die Antikippstützen immer nach unten geschwenkt zu benutzen sind!

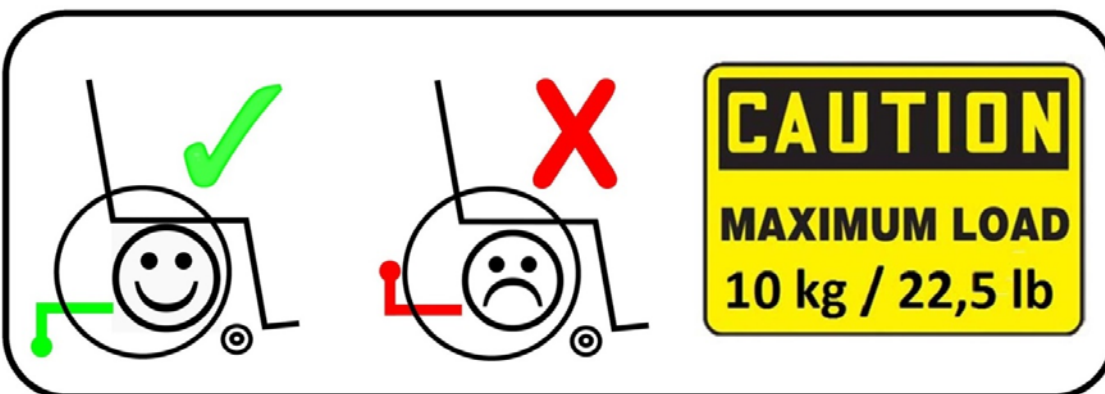

11. Hinweise zur Anwendung des Rollstuhles in Kombination mit dem Universal-Gerätehalter:

1. Die Anti-Kippstützen sind stets heruntergeschwenkt zu lassen, da der Rollstuhl nach hinten kippen könnte und dies bei hinter dem Rollstuhl stehenden Personen zu Fußverletzungen führen kann. Besonders ohne Nutzer im Stuhl ist eine erhöhte Kippgefahr gegeben (fehlendes Gegengewicht)! Achten Sie stets darauf, den Nutzer des Rollstuhles nicht unbeaufsichtigt zu lassen.
2. Die Anti-Kippstützen des Universal-Gerätehalters dürfen keinem Druck von oben ausgesetzt werden, z.B. bei einer Bordsteinüberwindung.
3. Das Überfahren von Bordsteinen ist zu vermeiden! Nutzen Sie Bordsteinabsenkungen!
4. Das in den Universalgerätehalter oder auf der Abdeckplatte eingesetzte Gerät ist mit einem Gurtband am Universal-Gerätehalter zu sichern (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass keine Schläuche, Kabel oder sonstige Verbindungen zum Gerät geknickt oder in Nutzung des Rollstuhles beschädigt werden können.
5. Der Universal-Gerätehalter darf nicht als Transportmittel für über 10 Kilogramm hinausgehende Lasten benutzt werden.
6. Reinigung:
Reinigen Sie den Universal-Gerätehalter und die optional erhältliche Abdeckplatte nur mit warmen Wasser, einer milden Seifenlauge und einem weichen Lappen. Vermeiden Sie bei der Reinigung des Kontroll-Sichtfensters den Einsatz von Scheuerschwämmen.
7. Wartung:
Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben und informieren Sie im Bedarfsfall Ihren zuständigen Fachhändler.
8. Haftungsausschluss:
Die Firma Alu Rehab haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung des hier beschriebenen Produktes entstehen.
9. Eventuelle Schäden am Universal-Gerätehalter oder Rollstuhl melden Sie bitte umgehend Ihrem Fachhändler oder der Alu Rehab ApS unter 0800-888 45 60 (Service-Hotline Deutschland) oder 0045 87 887 300 (Service-Rufnummer außerhalb Deutschlands). Sie können uns auch eine E-Mail an info@My-Netti.com senden.

Kontakt:

Alu Rehab ApS | Kløftehøj 8 | 8680 Ry | DENMARK

info@my-netti.com

www.my-netti.com

NOTIZEN