




Eingestellte Sitztiefe am Rückenteilhalter	Vordere Gaszylinder-Montage (A - B - C)	Rücken-Schliessbolzen - 38 mm - Artikel 20383	Rücken-Schliessbolzen - 96 mm - Artikel 21888	Startwinkel
40	B	X		91 °
40	C	X		101 °
40	A	X		nicht möglich
42,5	A	X		92 °
42,5	C		X	85 °
42,5	B	X		101 °
42,5	C	X		nicht möglich
42,5	A		X	nicht möglich
42,5	B		X	nicht möglich
45	C		X	95 °
45	B		X	85 °
45	A	X		103 °
45	B	X		nicht möglich
45	C	X		nicht möglich
45	A		X	nicht möglich
47,5	A		X	87 °
47,5	B		X	97 °
47,5	C		X	107 °
47,5	A	X		nicht möglich
47,5	B	X		nicht möglich
47,5	C	X		nicht möglich
50	A		X	98 °
50	B		X	108 °
50	C		X	nicht möglich

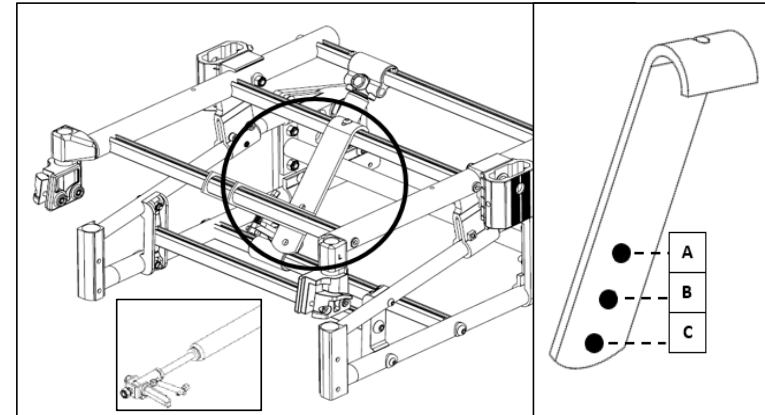

Vordere Gaszylinder-Anbindung (A - B - C)

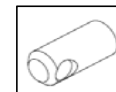




Kurzer Rücken-Schliessbolzen - 38 mm

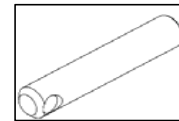


Langer Rücken-Schliessbolzen - 96 mm

Anwendungsanleitung für diese Übersicht:	
Grün = Standard-Einstellung für die gewählte Sitztiefe	Grüne Linien zeigen die Standard-Einstellung.
Gelb = Alternative Einstellung mit niedrigerem Startwinkel	Gelbe Linien zeigen die alternative Einstellung wenn ein kleinerer Startwinkel benötigt wird.
Blau = Alternative Einstellung mit höherem Startwinkel	Die blaue Linien zeigen die Einstellungs-Möglichkeit für einen höheren Startwinkel. Diese Einstellung empfiehlt sich bei Nutzern mit einer geblockten Hüftsituation.

Eingestellte Sitztiefe am Rückenteilhalter	Gaszylinder-Montage vorne muss immer am mittleren Loch = B erfolgen (siehe Zeichnung)	Eingestellte Sitztiefe an Zylinderhalterung	Startwinkel
42,5	B	42,5	92°
42,5	B	45	83°
42,5	B	47,5	not possible
42,5	B	50	nicht möglich
45	B	45	92°
45	B	47,5	83°
45	B	42,5	104°
45	B	50	nicht möglich
47,5	B	47,5	92°
47,5	B	50	83°
47,5	B	45	104°
47,5	B	42,5	nicht möglich
50	B	50	92°
50	B	47,5	104°
50	B	42,5	nicht möglich
50	B	45	nicht möglich

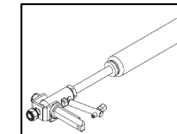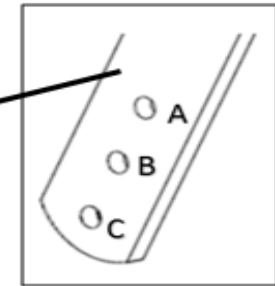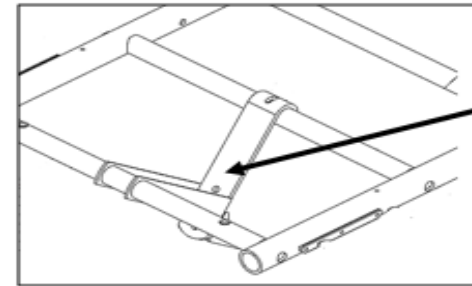

Vordere Gaszylinder-Anbindung (A - B - C)

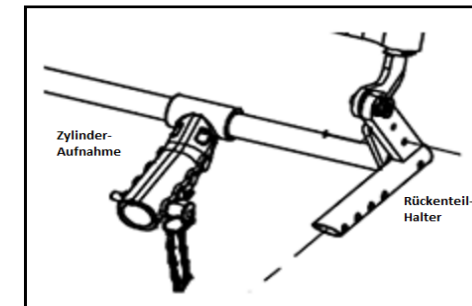

An einem CED/S (ST 37,5 bis 45 cm) wird das gleiche Schema angewendet wie bei einer ST 42,5-50 cm

### Anwendungsanleitung für diese Übersicht:

Grün = Standard-Einstellung für die gewählte Sitztiefe	Die grünen Linien zeigen die Standard-Einstellung bei identischer Einstellung an der Zylinder-Aufnahme hinten und der Einstellung am Rückenteilhalter. An der Zylinder-Halterung hinten befinden sich Markierungen für die Sitztiefe.
Gelb= Alternative Einstellung mit niedrigerem Startwinkel	Die gelben Linien zeigen die alternative Einstellung. Hierbei wird die Zylinder-Aufnahme hinten in die nächst höhere Sitztiefe eingestellt. Diese Einstellung bewirkt einen kleineren Startwinkel.
Blau - Alternative Einstellung mit höherem Startwinkel	Die blauen Linien zeigen die Einstellungs-Möglichkeit für einen höheren Startwinkel. Diese Einstellung empfiehlt sich bei Nutzern mit einer geblockten Hüftsituation. Hierbei wird die Zylinder-Aufnahme hinten in die nächst niedrigere Sitztiefe eingestellt.

Sitztiefe in cm	Artikel 80172 - Montagerichtung	Position von 80172 an Halterung des Sitzrahmens	Rücken- Schließbolzen - 82 mm	Startwinkel	Winkelbereich (maximaler Rückenwinkel)	Sitzplatten-Typ
40,00	<b>Entgegengesetzt</b>	C + D	23880	92°	40°	kurz
42,50	Standard	E + F	23880	92°	40°	kurz
45,00	Standard	D + E	23880	92°	40°	kurz
47,50	Standard	C + D	23880	92°	40°	lang
50,00	Standard	B + C	23880	92°	40°	lang

80172 - Standard Montagerichtung für ST 42,5 - 50,0 cm



80172 - **Entgegengesetzt** nur für ST 40,0 cm



Löcher A - F für Positionierung von 80172 an Sitzrahmen-Halterung



A + B = 50,0 cm

B + C = 47,5 cm

C + D = 45,0 cm

D + E = 42,5 cm

**E + F = 40,0 cm - Nur 1 ST mit entgegengesetzt montiertem Artikel 80172**